

1. Účel použití:

Chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá k udržení stability při chůzi a odlehčení dolních končetin. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro použití v interiéru! Je zakázáno chodítko používat v exteriéru!

2. Varování:

Vhodnost použití chodítka musí vždy posoudit ošetřující lékař s přihlédnutím k diagnóze a zdravotnímu stavu pacienta. Chodítko nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon přesahuje 3,5°, rampách a na schodištích. Chodítko nesmí být použito k přepravě nepohyblivých osob, nákladů apod.. Konstrukce chodítka je navržena na maximální rovnoměrné zatížení 170 kg.

3. Technický popis a základní parametry:

Chodítko je vyrobeno z ocelových trubek s povrchem z práškového laku, zinkovaným nebo chromovaným. Podpůrná deska ve tvaru U je čalouněna zdravotnickou koženkou. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými kolečky bez brzdy a vzadu dvěma otočnými kolečky s brzdou. Do horního svislého rámu jsou zapuštěny dvě výsuvné podpěry horní desky.

Délka 80 cm, šířka 100 cm, měnitelná výška 96 – 144 cm, hmotnost 28 kg



CE

4. Návod k montáži a použití:

Chodítko se dodává ve zkompletovaném stavu. Po vyjmutí chodítka z přepravního obalu a odstranění veškerého balicího materiálu je připraveno k použití. Povolněním pák na horní části rámu uvolníte vždy samostatně každou z podpěr desky. Ty nastavíte rovnoměrným vysunutím na požadovanou výšku a pevně utáhnete. Vysunutí lze provést max. do výšky označené ryskou. Ta musí být vždy skryta v nosné trubce. Uvolněním matic s plastovým krytem pod čalouněnou deskou po obou jejích stranách seřídíte vysunutím a natočením úchyty rukou. Po nastavení do požadované polohy matice pevně dotáhněte. Všechny spojovací klouby řádně dotáhněte. Před vlastním užitím podrobte chodítko zkoušce zdravé osobě s minimálně stejnou hmotností jakou má uživatel chodítka (ne však vyšší než je maximální přípustné rovnoměrné zatížení chodítka). Po zdárné zkoušce je chodítko připraveno k užívání.

5. Návod k použití:

Chodítko vždy používejte pouze v interiéru, a to na rovných plochách, jejichž sklon nepřevyšuje 3,5°. V opačném případě by mohlo dojít k převrnutí chodítka i s obsluhou a ublížení na zdraví či poškození okolních předmětů. Chodítko zabrzdíte sešlápnutím brzdové páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrzdění provedete nadzvednutím brzdové páčky každého zabrzděného kolečka. Podpažní opěra musí rovnoměrně podírat v přirozeném postoji paže uživatele od loktů směrem k zápěstím (předloktí s paží by mělo svírat úhel 90°). V poloze, kdy se předloktí plně opírá o podpažní opěru, nesmí uživatel stát na špičkách, ani nesmí cítit potřebu pokrčovat kolena. Úchyty rukou nastavte tak, aby je obě opřené ruce mohly pohodlně uchopit a dle potřeby je vytočte. Při správném nastavení úchytů rukou a podpažních opěr je váha rovnoměrně roznesena po obou předloktích rukou. V opačném případě budou jednotlivé partie předpaží namáhány nerovnoměrně. Toto nerovnoměrné rozložení zatížení se projeví předčasnou bolestí více namáhaných částí. Proto dbejte na důkladné nastavení a přizpůsobení podpažních opěr a úchytů rukou před vlastním užíváním.

6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme chodítko řádně vyčistit. Chodítko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o chodítko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Chodítka nejsou určena do myček ani sterilizátorů!

7. Údržba:

Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.

8. Servis:

Chodítka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy. Pokud dojde při údržbě chodítka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

9. Záruka:

Na chodítko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

10. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřídte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

11. Obsah balení:

- 1 x Chodítko U-2B XXL
- 1 x Návod k použití