

1. Účel použití:

Jmenovka nerezová na čelo lůžka je určena jako příslušenství pro lůžka s lamino nebo UNI bedněním vyráběné firmou PROMA REHA s.r.o.. Slouží pro umístění základních informací o pacientovi – jeho jména, příjmení atd.. Svými technickými vlastnostmi je určena výhradně pro použití v interiéru, a to s lůžky vyráběnými firmou PROMA REHA s.r.o..

Jmenovka je určena pouze k umísťování základních informací o pacientovi, nikoliv k zavěšování či přichycování jakýchkoliv jiných břemen.



2. Varování:

Nerezovou jmenovku je nutné chránit před stykem s ostrými předměty, prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním. Při umísťování jmenovky na čelo lůžka dejte pozor, aby se žádná část vašeho těla nedostala mezi čelo a jmenovku. Mohlo by dojít k ublížení na zdraví přiskřípnutím!!

3. Technický popis a základní parametry:

Jmenovka je vyrobena z nerezového plechu. Její rozměry jsou: délka 100 mm, výška 80 mm, hmotnost 0,1 kg.

4. Návod k montáži a použití:

Papírovou kartičku se základními informacemi zasuňte z libovolné strany pod podélné plechové lemy. Dejte pozor, aby informace uvedené na kartičce byly čitelné, tzn. aby informace byly při vkládání do jmenovky umístěny na vnější straně papírové kartičky. Jmenovku s takto vloženými informacemi o pacientovi zavěste na dřevěné čelo lůžka. Jmenovku vždy zavěšujte rovnoměrně a svisle. V opačném případě by mohlo dojít k poškrábání čela lůžka nebo k poranění obsluhy skřípnutím. Jmenovku odejmete zvednutím vzhůru z čela lůžka.

5. Čištění:

Jmenovku čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o jmenovku mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Jmenovka není určena do myček ani sterilizátorů!

6. Údržba a servis:

Jmenovka nevyžaduje žádnou údržbu ani servis.

7. Záruka:

Na jmenovku je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluknost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříděte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

- 1 x Jmenovka nerezová na čelo lůžka
- 1 x Návod k použití