

1. Účel použití:

Jmenovka plastová na čelo lůžka s klipsem je určena jako příslušenství pro lůžka s nemocničními čely vyráběná firmou PROMA REHA s.r.o.. Slouží pro umístění informací o pacientovi. Svými technickými vlastnostmi je určena výhradně pro použití v interiéru, a to s lůžky vyráběnými firmou PROMA REHA s.r.o.. Jmenovka je určena pouze k umísťování informací o pacientovi, nikoliv k zavěšování či přichycování jakýchkoliv jiných předmětů.

2. Varování:

Plastovou jmenovku je nutné chránit před stykem s ostrými předměty, prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním (především nadměrným rozevíráním). Při umísťování jmenovky na čelo lůžka dejte pozor, aby se žádná část vašeho těla nedostala mezi rám čela a vlastní jmenovku / teplotku. Mohlo by dojít k ublížení na zdraví přiskřípnutím!!

3. Technický popis a základní parametry:

Jmenovka je vyrobena ze světlého plastu. Je osazena klipsem pro uchycení karty příslušného formátu s informacemi o pacientovi. Rozměry jednotlivých jmenovek / teplotek jsou uvedeny níže.

Jmenovka plastová A4 ↑



Výška 36 cm, šířka 24 cm,
hmotnost 0,3 kg.

Jmenovka plastová A4 ↔



Výška 27 cm, šířka 33 cm,
hmotnost 0,3 kg.

Jmenovka plastová A5 ↓



Výška 27 cm, šířka 18 cm,
hmotnost 0,2 kg.

4. Návod k montáži a použití:

Rozevřete ocelový klips a vložte něj kartu s informacemi o pacientovi. Dejte pozor, aby informace uvedené na kartě byly čitelné, tzn. aby byly informace při vkládání do klipsu jmenovky umístěny na vnější straně karty. Jmenovku s takto vloženými informacemi o pacientovi zatlačte na trubkový rám lůžka. Při odebírání jmenovky lehce roztáhněte její okraje a sejměte ji z trubkového rámu.

5. Čištění:

Jmenovku čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky. Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o jmenovku mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Jmenovka není určena do myček ani sterilizátorů!

6. Údržba a servis:

Jmenovka nevyžaduje žádnou údržbu ani servis.

7. Záruka:

Na jmenovku je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztrďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití. Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou zinkem a dále plastové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení: 1 x Jmenovka / teplotka plastová na čelo lůžka s klipsem, 1 x Návod k použití