

- ☐ Sendvič, ☐ Lux N, ☐ Lux P, ☐ Extra, ☐ Eulastic, ☐ Hospital, ☐ Eucatherm,
☐ Comfort, ☐ Brigita, ☐ Latex, ☐ Flex, ☐ SoftFlex, ☐ Podložka, ☐ Návlek

1. Účel použití:

Matrace jsou určeny pro nemocniční, ústavní a domácí použití v součinnosti s lamelovými nebo síťovými polohovacími rošty. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:

Při manipulaci se snímatelným potahem dbejte o to, aby návlek ani jádro matrace nebyly poškozeny nevhodným postupem snímání a navlékání potahu.

3. Technický popis a základní parametry:

Sendvič – Sendvičová matrace se skládá ze střední vrstvy tvořené RE pěnou a dvou vnějších vrstev z PUR pěny. Střední vrstva zaručuje vyšší nosnost a prodlužuje životnost matrace. S potahem SAFR, který svými vlastnostmi působí jako prevence proti vlhkosti, přehřátí a eliminuje střížné a třecí síly, odpovídá všem hygienickým požadavkům ve zdravotnictví. Matrace je potažena potahem z DAMAŠKU nebo SAFRu.

Lux N – Jádro z kvalitní PUR pěny o objemové hmotnosti min. 30kg/m³ a výšce 120 mm, nebo studené PUR pěny HR 3045 a potahem SAFR, který svými vlastnostmi působí jako prevence proti vlhkosti a přehřátí a eliminuje střížné a třecí síly, odpovídá všem hygienickým požadavkům ve zdravotnictví.

Lux P – Preventivní antidekubitní matrace ze studené PUR pěny HR4045. Jádro matrace je podélně a příčně prořezáno. Průřezy v matraci zajišťují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím. Matrace je vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů. Je potažena potahem ze SAFRu.

Extra – Preventivní antidekubitní matrace z líné pěny a ze studené PUR pěny s odvodušňovacími otvory. Jádro matrace je tvořeno studenou pěnou a je příčně prořezané, čímž je zabezpečeno rovnoměrné odvodušnění. Nosná vrstva je tvořena 4 cm líné pěny. Je potažena potahem ze SAFRu. Výška 12 cm.

Eulastic – Nosné jádro tvoří vysoce pružná pěna Eulastic speciálně rozčleněná do 5 anatomických zón. Vysoký komfort dotváří oboustranně použitá viscoelastická pěna Eucatherm C v ramenních zónách, kde je vždy vyvíjen na tělo největší tlak. Tato matrace nabízí vysokou nosnost s využitím „vnoření nejnamáhanějších partií těla do matrace tak, aby bylo tělo vždy ve fyziologicky správné poloze. Matrace je vhodná pro pacienty s vyšším rizikem vzniku dekubitů, potah SAFR plus. Výška 14 cm.

Hospital – Luxusní matrace s revoluční novinkou 3D úplet. Tato novinka je vyvinutá speciálně pro výrobu zdravotních matrací, které zabezpečí unikátní paroprodyšnost. Jádro je vyrobeno zvláštním tvarováním z pružné pěny pod označením EULASTIC do pěti anatomických zón, které zajistí pro každou část těla optimální měkkost a dokonalé provzdušnění matrace. Tato matrace se svými parametry překročí i kvalitu latexových matrací. Matrace je vhodná pro pacienty s vyšším rizikem vzniku dekubitů, potah SAFR plus. Výška 14 cm.

Eucatherm – Tato matrace je vyvinuta speciálně pro osoby obzvláště citlivé na otlačení, s vysokým rizikem vzniku dekubitů a pro pacienty, u kterých se vyskytují dekubity. Zvláštností této matrace je použití speciální vysoce elastické pěny pod označením Eucatherm C (líná pěna), jedná se o unikátní pěnu, jejíž tvrdost se mění v závislosti na teplotě. Díky efektu tzv. pomalého vracení se do původní polohy nabízí jedinečné rovnoměrné rozložení tlaku matrace na tkáň, což má pozitivní vliv na krevní oběh. Tato matrace plně respektuje anatomii těla rozdělením do 7 zón. Je možné využít i opačnou stranu matrace, kde je díky použité pěně Eulastic matrace vysoce pružná. Potah SAFR plus. Výška 14 cm.

Comfort – Matrace Comfort je velmi pohodlná matrace s dlouhou životností o hmotnosti pěny 54 kg na m³. Je vhodná pro použití jako základní matrace v rámci zdravotní péče. Vyrábí se v tloušťkách 9 až 13 cm. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX. Výška 10 cm.

Podložka – Podložka je tvořena 5 cm líné pěny.

Brigita – Luxusní sendvičová matrace s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi vyrobená ze studené pěny. Studená pěna je tvořena většími buňkami se silnější stěnou než mají PUR pěny, je proto prodyšnější a lépe odvádí teplo. Studená pěna vyniká výbornou elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou životností. Jádro matrace je tvořeno zónovým sendvičem, který zajišťuje ideální polohu páteře v průběhu spánku. Matrace má na ložné ploše anatomické tvarování, které zajišťuje lehkou masáž a způsobuje relaxaci zádočných svalů a účinně předchází bolestem zad a ztuhlosti svalů šíje. Masážní noky příznivě ovlivňují prokrvení pokožky. V jádru matrace jsou počítacem navržené příčné perforace, které zvyšují prodyšnost a ventilaci matrace. Výška 15 cm.

Latex – Luxusní vysoce kvalitní latexová matrace s ortopedickými a antialergickými vlastnostmi s výbornou kopírovatelností. Použité nosné latexové jádro s pěti anatomickými zónami poskytuje individuální oporu zvláště v oblasti hlavy, ramen, trupu, boků a noh. V kombinaci s polohovatelným lamelovým roštem je zvýšena její užitná hodnota (např. při čtení, sledování televize...) a matrace získává výborné ortopedické vlastnosti. Dokonalou vzdušnost latexového jádra zajišťují odvodušňovací kanálky. Výška 16 cm.

Flex – IV. stupeň rizika vzniku dekubitů (vyšší riziko), 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonovy stupnice. Matrace Flex je přídatná matrace pokládající se na základní matraci. Vyrábí se v tloušťkách 4 a 7 cm. Je vhodná nejen pro prevence, ale i pro léčbu dekubitů. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou folií, či ve snímatelném potahu HUMIDITEX. Matrace Flex poskytují účinné uvolnění tlaku a jsou opatřeny snadno udržovatelným hygienickým povrchem, který splňuje všechny požadavky, např. v případě dekubitů nebo špatného krevního oběhu, bolestí zad nebo svalů, při poruchách spánku, atd. „Flex“ je vyrobena z nové, unikátní, tlak uvolňující pěny, která se přizpůsobí tělesné teplotě a rozloží tlak po celém povrchu těla. To umožní nerušený krevní oběh a snižuje nebezpečí vzniku dekubitů. „Flex“ se dodává v tloušťkách 4 a 7 cm a pokládá se na původní matraci. Požadovaná tloušťka je dána váhou pacienta a potřebou uvolnění tlaku.

SoftFlex – IV. stupeň rizika vzniku dekubitů (vyšší riziko), 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonovy stupnice. Matrace Soft Euroflex je 13 cm vysoká matrace se 7 cm silnou základní vrstvou za studena formované pěny (54kg/m³), 4 cm silnou vrstvou viskózní plastické pěny Flex a 2 cm silnou polyetherovou měkkou vrstvou Soft. Je vhodná nejen pro prevenci, ale i pro léčbu vysokého stupně dekubitů. Antidekubitní matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX. „Soft Euroflex“ je třívrstvá matrace s 2 cm silnou vrstvou za studena formované pěny, 4 cm vrstvou pružné pěny rozkládající tlak a 6 cm silnou základní vrstvou za studena formované pěny. Tato kombinace poskytuje měkký povrch s účinným rozložením tlaku. „Soft Euroflex“ je úplná matrace, která může nahradit obyčejnou matraci. „Soft Euroflex“ je zcela nový typ matrace proti dekubitům.

Návleky - jsou vyrobeny z nánosové textilie Teporex Sanapur. Tato textilie je plně omyvatelná, nepropustná, avšak prodyšná. Při jejím žehlení z rubu při 110°C nedochází k žádným změnám povrchové úpravy textilie ani k rozměrovým změnám.

4. Návod k použití:

Matrace včetně návleku jsou dodávány v ochranných přepravních obalech. Po vyjmutí z přepravního obalu je matrace připravena k použití. Při odstraňování obalového materiálu nepoužívejte žádné ostré předměty, které by mohly porušit potah nebo vlastní jádro matrace. Matraci umístěte na rošt lůžka tak, aby vždy krycí lem zipu překrýval zip shora dolů. Samostatnou matraci bez prostěradla nevystavujte přímému slunečnímu záření, které urychluje změnu povrchových vlastností matrace i návleku. Při užívání může dojít k zvlnění návleku. Vadou nejsou ani změny rozměru návleků způsobené běžným používáním matrace.

Před čištěním matrace je třeba oddělit matraci od návleku. Každý návek je opatřen zipem, který musí být před vkládáním matrace či jejím vyjímáním plně rozepnut. Při navlékání návleku na matraci dejte vždy pozor, aby se jeho rubová strana dotýkala matrace (byla uvnitř) naopak od lící. Po zapnutí zipu je matrace včetně návleku připravena k použití.

5. Čištění:

Návleky čistěte pouze prostředky k tomu určenými a dbejte návodu k obsluze výrobce čistícího prostředku. U textilií může dojít k zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměru potahů způsobené běžným používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být $\pm 1,5\%$ u šířky a $\pm 1\%$ u délky potahu.

Návleky matrací je nutno ošetřovat dle symbolů všítych do lemu každého návleku.

Postup při praní - maximální teplota 95°C, normální mechanické působení, normální máchání, normální odstředování

Postup bělení - výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor

Postup žehlení - žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110°C, a to pouze z rubu

Postup chemického čištění - výrobek se nesmí chemicky čistit. Skvrny se nesmějí odstraňovat organickými rozpouštědly

Postup sušení - výrobek se smí sušit v bubnové sušičce při normálním sušícím programu

6. Údržba:

Matraci jedenkrát měsíčně vysajte od prachu.

7. Záruka:

Na matrace PROMA je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hluknost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztříděte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití. Výrobek obsahuje textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.



Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

1 x Matrace včetně návleku, 1 x Návod k použití