

1. Účel použití:

Přenosný držák holí je určen jako příslušenství k lůžku. Slouží pro zavěšování dvou holí na lůžku pacienta, aniž by bylo zapotřebí jakýmkoliv způsobem zasahovat do opláštění lůžka. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru, a to s lůžky vyráběnými firmou PROMA REHA s.r.o..

Držák je určen pouze k zavěšování samostatných holí, nikoliv k zavěšování jakýchkoliv jiných předmětů.

2. Varování:

Držák je nutné chránit před stykem s ostrými předměty, prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním. Při umísťování držáku na čelo lůžka dejte pozor, aby se žádná část vašeho těla nedostala mezi rám čela a držák. Mohlo by dojít k ublížení na zdraví přiskřípnutím!!

3. Technický popis a základní parametry:

Držák je vyroben ze světlého plastu a dvou kovových držáků holí s povrchovou úpravou zinkem. Vlastní mechanismus uchycení holí je pryžový. Šířka 18 cm, výška 12 cm, hmotnost 0,2 kg.

4. Návod k montáži a použití:

Držák holí zatlačte na trubkový rám čela (bednění či UNI zábranu). Naopak při jeho odnímání lehce roztáhněte okraj obepínající rám čela (bednění či UNI zábranu) a sejměte jej. Hůl do držáku zatlačte v libovolném místě hole. Odejmutí hole z držáku provedete opačným způsobem.

5. Čištění:

Držák holí čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čisticí prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o držák holí mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Držák holí není určen do myček ani sterilizátorů!!!

6. Údržba:

Držák hole nevyžaduje žádnou údržbu ani pravidelný servis.

7. Záruka:

Na přenosný držák je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

8. Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztrďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou chromem a zinkem a dále plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!

9. Obsah balení:

- 1 x Přenosný držák na 2 ks holí
- 1 x Návod k použití

